

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 39 del 25/10/2021**

Il Direttore

VISTO il provvedimento redatto dal competente *Ufficio Affari Generali* relativo a:

“Approvazione Istruzione Operativa disinfezione carrello multisensoriale Snoezelen”;

ivi allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la normativa generale di ordinamento e disciplina delle Aziende di Servizi alla persona ed in particolare:

- D.lgs. 241/90
- D.lgs. 207/2001
- L.R. 2/2003
- Lo Statuto dell’ASP
- Il Regolamento che disciplina gli uffici e servizi dell’ASP;

ESAMINATO il testo del suddetto documento che risulta nei suoi contenuti conforme alla normativa vigente;

RITENUTA opportuna la sua approvazione per le ragioni in esso espresse;

CONSIDERATO inoltre che non sussistono vizi od impedimenti di alcuna natura che ne possano impedire l’esecutività;

DETERMINA

DI APPROVARE l’allegato testo di provvedimento che viene classificato con la numerazione e datazione come da intitolazione;

DI DARE ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l’apposizione della firma attestante l’approvazione del medesimo;

DI TRASMETTERE il presente atto al competente ufficio per la sua pubblicazione, trasmissione agli eventuali soggetti interessati e conservazione a norma delle norme vigenti.

F.to Digitalmente da



Il Funzionario

RAVANELLO ALBERTO / INFOCERT SPA

OGGETTO: Approvazione Istruzione Operativa “Disinfezione carrello multisensoriale Snoezelen”.

DATO ATTO che ASP ha acquistato tre carrelli multisensoriali (una per ogni CRA) per poter attivare il percorso di stimolazione multisensoriale per gli anziani denominato “Snoezelen”;

VISTO che vi è la necessità di approvare apposita istruzione operativa per garantire la sanificazione dei tre carrelli visto il perdurare della pandemia da Covid-19;

VISTA la proposta di istruzione operativa presentata dalla Responsabile del Servizio Anziani Dott.ssa Maria Grazia Brozzi;

RITENUTA tale proposta conforme ai protocolli anti Covid-19

DISPONE

1. Di approvare, a far data dal 26/10/2021, l’istruzione operativa “Disinfezione del carrello multisensoriale Snoezelen” così come allegata (Allegato A) alle presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che, allegata all’istruzione operativa (Allegato 1) vi è la scheda tecnica del prodotto utilizzato per la disinfezione dei carrelli multisensoriali;
3. Di dare mandato alla Responsabile del Servizio Anziani di inoltrare ai Coordinatori la procedura in oggetto per l’opportuna diffusione e illustrazione all’interno della tre CRA;

DESTINATARIO ISTRUZIONE: Animatore e R.A.A.

SCOPO: Prevenzione contagio Covid- 19 Disinfezione Carello Snoezelen

Allegato: scheda tecnica prodotto disinfettante

Decorrenza Istruzione Operativa: dal 26/10/2021

Premessa:

Asp Magiera Ansaloni gestisce tre Casa Residenza Anziani sui Comuni di Campagnola Emilia, Rio Saliceto e San Martino in Rio, tutte e 3 le strutture sono dotate del Carrello Snoezelen.

dal 26/10/2021 verrà utilizzato dalle Animatrici che individueranno gli anziani da coinvolgere e ne sperimenteranno gli eventuali e desiderati benefici.

CHE COS'È?

Il carrello Snoezelen è una soluzione utile e versatile che permette di realizzare dei trattamenti multisensoriali quando non è presente uno spazio dedicato.

La postazione comprende stimoli e materiali diversi che permettono di personalizzare e diversificare gli interventi a seconda degli obiettivi.

COME E QUANDO USARLO?

Il carrello Snoezelen si può facilmente spostare per mezzo di ruote e questo permette di utilizzare la stimolazione multisensoriale in ogni ambiente: nelle aree comuni, nelle stanze o nel bagno, in qualsiasi momento è necessario un trattamento sulla base degli obiettivi e delle necessità rilevate.

STRUMENTI IN DOTAZIONE

La postazione è allestita con strumenti diversi che permettono di personalizzare e diversificare gli interventi a seconda degli obiettivi. Tubo a bolle, proiettore effetti, diffusore aromi, impianto musicale e fascio fibre ottiche.

Modalità di intervento:

Le Animatrici delle CRA utilizzeranno il Carrello in particolare per trattamenti individuali, sarà loro responsabilità far disinfettare con il gel alcolico a disposizione le mani dell'anziano prima, durante e dopo ogni trattamento.

Le superfici che l'anziano toccherà (nello specifico tubo a bolle o fibre ottiche) saranno disinfettate con apposito prodotto disinfettante prima e dopo ogni utilizzo individuale.

Si allega scheda tecnica del prodotto Alcor disinfettante.

Rev.	Data	Pagine/paragrafi modificati	Redazione	Verifica	Approvazione
0	22/10/2021		Responsabile Servizio Anziani		25/10/2021 Direttore ASP



ALCOR DISINFETTANTE

Disinfettante sgrassante battericida, fungicida e virucida per tutte le superfici Presidio Medico Chirurgico Reg. 19761 del Ministero della Salute

Generalità

Disinfettante sgrassante universale ad azione battericida, fungicida e virucida per la disinfezione e la pulizia profonda di tutte le superfici, attrezzature, arredi e pavimenti in ambienti pubblici e privati, strutture ospedaliere, HACCP, mezzi di trasporto pubblici.

ALCOR DISINFETTANTE svolge una doppia funzione:

1. Disinfezione completa grazie ad una energica attività contro batteri, funghi e virus dovuta alla contemporanea presenza di Sali di ammonio quaternario, alcoli, principi anfoteri e olii essenziali.
2. Rimozione degli sporchi più gravosi anche incrostati grazie ad un potente effetto sgrassante. ALCOR DISINFETTANTE elimina macchie di olii e grassi, bevande, caffè, vino, inchiostri, pennarelli, strisciate di gomma, sporco accumulato e incrostato, sporco atmosferico.

ALCOR DISINFETTANTE è stato testato in base alle seguenti norme europee:

- per l'attività **battericida**
EN 1276 e EN 13697
- per l'attività **fungicida e lieviticida**
EN 1650 e EN 13697
- per l'attività **virucida**
EN 14476

ALCOR DISINFETTANTE non produce schiume, lascia le superfici pulite e senza residui e non richiede risciacquo.

Campi di applicazione

ALCOR DISINFETTANTE trova impiego in ambienti collettivi e pubblici, nelle strutture ospedaliere, ambulatori, case di cura e di riposo, asili e scuole, uffici, cucine, ambienti HACCP, aree di preparazione alimenti, industrie alimentari, alberghi, centri di benessere, palestre, mezzi di trasporto pubblico.

ALCOR DISINFETTANTE è utilizzato per la disinfezione e la pulizia di superfici lavabili, attrezzature, arredi, scrivanie, mobili, piani di lavoro e di preparazione alimenti, lavelli, utensili, frigoriferi, elettrodomestici, fornelli, dispense, porte, maniglie, tastiere, telefoni, pareti, pavimenti.

ALCOR DISINFETTANTE è idoneo per il settore alimentare in quanto elimina lo sporco grasso dalle superfici a contatto con gli alimenti. È ideale per superfici, attrezzature e pavimenti nelle camere bianche alimentari.

ALCOR DISINFETTANTE è compatibile con le superfici di PVC, plastica, acciaio, ceramica, pietre naturali, marmo, granito, agglomerati, cotto.

ALCOR DISINFETTANTE è sicuro su tutti i metalli e non intacca parti cromate, stagnate o zincate, alluminio.

ALCOR DISINFETTANTE

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	Benzalconio cloruro, solventi idrosolubili, principi anfoteri, tensioattivi non ionici
ASPETTO FISICO	Liquido trasparente di leggera tonalità verde
PROFUMO	Agrumato
PESO SPECIFICO	0,98
pH tal quale	11
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Modalità d'impiego

SUPERFICI

Per disinfettare: nebulizzare e lasciare agire per 5 minuti.

Ripassare con panno o carta asciutti.

Per pulire e igienizzare: nebulizzare e strofinare con panno o carta fino ad asciugatura.

In caso di superfici a diretto contatto con gli alimenti si consiglia di risciacquare.

PAVIMENTI

Per disinfettare: nebulizzare e lasciare agire per 5 minuti. Ripassare con mop umido o lavasciuga.

Come detergente igienizzante senza risciacquo:

utilizzare in diluizione dello 0,5% (50 ml di prodotto in 10 litri d'acqua). Applicare con mop o lavasciuga. Non richiede risciacquo.

Usare con cautela su gomma, linoleum e superfici verniciate facendo possibilmente una prova preliminare di resistenza su una porzione nascosta.

Ulteriori informazioni

Attenzione - Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. In caso di irritazione della pelle o degli occhi: consultare un medico. Non disperdere nell'ambiente. Non miscelare con altri prodotti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

OFFICINA DI PRODUZIONE

Autorizzazione Decreto Ministero della Sanità
n° 9/2001 del 19/03/2001

KITER S.r.l. - Via Assiano 7/B - 20019 Settimo
Milanese - MI

È un PMC: leggere attentamente quanto
riportato sulla confezione. **(Reg. N. 19761)**



12 flaconi da 750 ml.
con 3 nebulizzatori
4 canestri da 3lt.

